



上海源叶生物科技有限公司  
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd  
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248  
网址: [www.shyuanye.com](http://www.shyuanye.com)  
邮箱: shyysw@sina.com

## 抗 A 抗 B 血型定型试剂(单克隆抗体)说明书

【货号】R21905

【药品名称】

通用名: 抗 A 抗 B 血型定型试剂(单克隆抗体)

英文名: Anti-A and Anti-B Blood Grouping Reagents (Monoclonal Antibody)

本品系用 A 血型单克隆抗体或 B 血型单克隆抗体配制而成, 用于鉴定人 ABO 血型。

【使用方法】

(1)平板法(玻片法):本品与受检者全血或 10% 红细胞生理盐水悬液按 1:1 使用, 不必再稀释, 按照有无凝集判定结果。

(2)试管法: 本品与受检者 5% 红细胞生理盐水悬液按 1:1 使用, 不必再稀释, 摇匀, 1000r/min 离心 1 分钟或室温静置 1 小时, 按照有无凝集判定结果。

血型	抗 A 血型试剂	抗 B 血型试剂
A	+	-
B	-	+
O	-	-
AB	+	+

【注意事项】

(1)为了便于鉴别, 抗 A 血型试剂染色呈蓝色, 抗 B 血型试剂染色呈黄色。



上海源叶生物科技有限公司  
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd  
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248  
网址: [www.shyuanye.com](http://www.shyuanye.com)  
邮箱: shyysw@sina.com

(2)对含有较多自身冷凝集素的受检者,在鉴定血型时往往被误定为 AB 血型,遇到此种情况,需用 37℃生理盐水溶液洗涤受检者红细胞 2-3 次,以去除吸附在红细胞的冷凝素,然后在鉴定血型。

(3)在做配型试验时,如发现有不配合现象,则取受检者血清,用已知 A 血型或 B 血型红细胞进行反定型试验,以核实原鉴定的血型是否正确。

(4)用试管法立即离心不能测出亚型(如 Ax),需延长作用时间。

(5)本品如出现浑浊或变色则不能使用,若开瓶使用时间较长后,最好用已知 A、B、O 血型红细胞检查结果是否与已知血型相符,以防制品污染、变质失效,而造成鉴定错误。

**【规格】** 10ml/每支

**【贮藏】** 于 2-8℃避光保存,在有效期内使用。

**【包装】** 塑料瓶抗 A、抗 B 各 1 支/盒

**【有效期】** 有效期为 18 个月。