



上海源叶生物科技有限公司  
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd  
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248  
网址: www.shyuanye.com  
邮箱: shyysw@sina.com

## 病毒保存液(灭活型,含胍盐,无色)

货号: R27141

保存温度: RT 保存, 有效期 12 个月。

### 产品简介:

病毒保存液主要用于组织、细胞病理学分析样本的保存, 不仅包括冠状病毒、流感病毒、手足口病毒、麻疹风疹病毒, 也包括其他类别的病毒和支原体、脲原体, 在储存及运输过程中能够保持病毒核酸的完整性。

源叶病毒保存液含 pH 缓冲剂、胍盐、渗透压维持剂、抗生素等, 能保存细胞或病毒的完整性, 将采集到的具有代表性的病毒保存于病毒保存液后进行核酸 RNA/DNA 的提取, 将鼻、咽拭子置于病毒保存液后其独特组份可以保护核酸 RNA 免受 RNA 酶的降解, 以及保护脱氧核糖核酸 DNA 免受 DNA 酶的降解, 联合使用多种抗生素和防腐剂使该产品具有较强的抗细菌和抗真菌作用, 病毒样本采集后保存, 只保存 RNA 不受到破坏, 没有病毒活性。该产品仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

名称	R27141		保存条件
病毒保存液(灭活型,含胍盐,无色)	500ml	6*500ml	RT
使用说明书	1 份		

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、根据不同目的, 用采样拭子或其他工具在相应的部位采样病毒;
- 2、置于病毒保存液中的样本, 可 2~8℃短时间(不超过 48 小时)保存和运输。

### 注意事项:

- 1、处理鼻涕液或痰液标本时, 应注意充分稀释和混匀。



上海源叶生物科技有限公司  
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd  
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248  
网址: [www.shyuanye.com](http://www.shyuanye.com)  
邮箱: [shyysw@sina.com](mailto:shyysw@sina.com)

---

- 2、采集标本必须保证新鲜， 以免细胞自溶。
- 3、本试剂对眼睛和皮肤有一定的刺激性，若不慎溅入眼睛即用清水冲洗，使用时应当保持通风。
- 4、本产品仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。
- 5、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

